



SeekBird

Se efter ikonet for at downloade APP'en

Produkt manual

Apple-brugere download metode:

App Store

Apple-brugere

Søg i
Apple App Store
SeekBird

Android-bruger download metode:

Android-brugere
i WeChat eller browser
Scan QR-kode



Tilslutning proces


①

Før du forbinder skal du sikre dig at der er nok strøm på, Tryk og hold kontakten inde i tre sekunder for at tænde den




②

Opret forbindelse til hotspottet "SeekBird-xxxx"

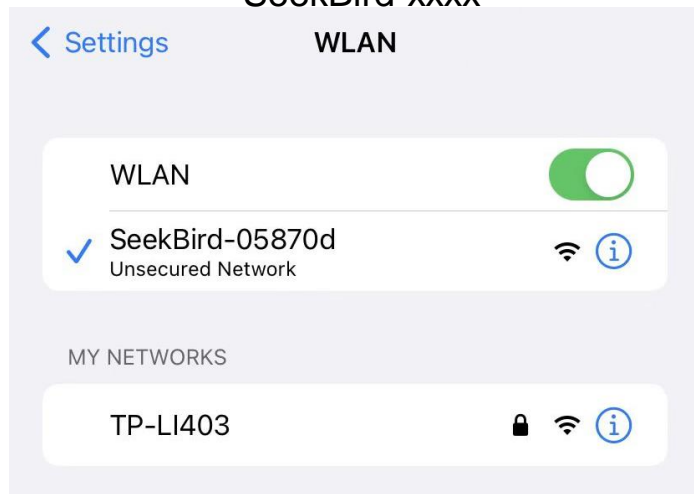


③

Åbn SeekBird, Lad derefter WIFI finde og oprette forbindelse til en enhed på det lokale netværk

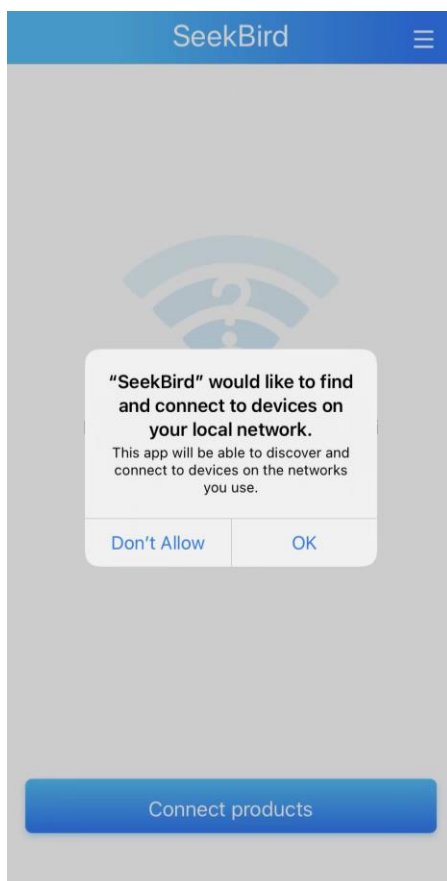


④

Hvis du støder på denne, klik på "Bliv ved med at prøve WLAN"

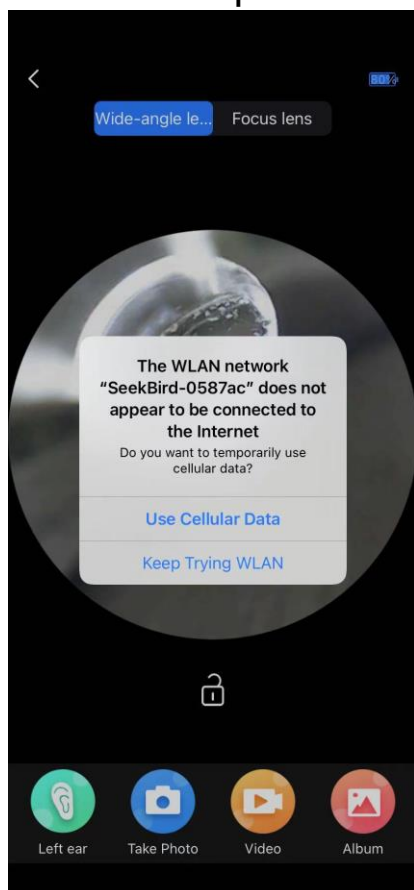

⑤

Klik på start

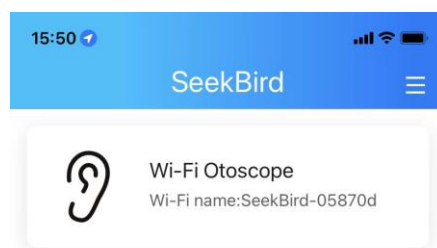


★Når telefonen beder om at tillade denne enhed og bruge det lokale netværk, vælg venligst "Tillad"

★Under processen med at downloade APP-forbindelsen, mobiltelefonen kan komme med en pop-up, du skal være opmærksom på valget

⑥

APP-brugergrænseflade

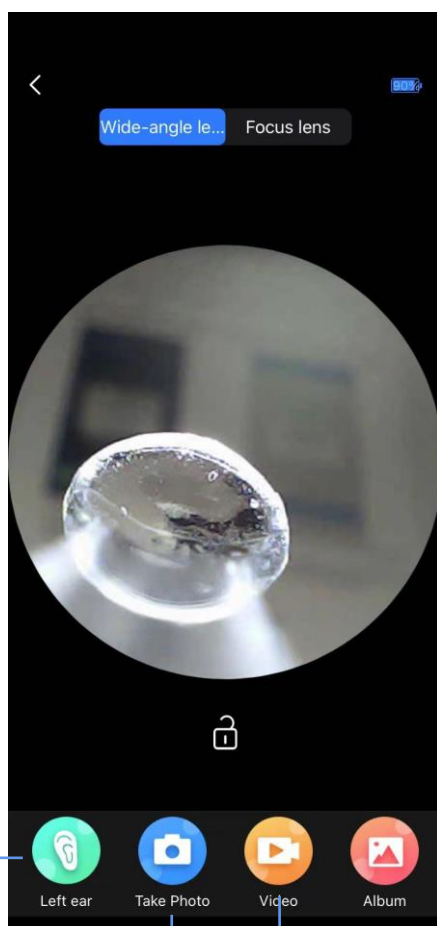

Valg imellem Venstre og højre øre

Kamera

skærmoptagelse

Gemte billeder og video

① Øre-ske installation

Når du installerer øre-skeen, skal du stramme den med uret



Når du fjerner øre-skeen, skal du dreje den mod uret.

Sørg for at skrue den fast, før du bruger den for at forhindre, at øre-skeen falder af



② Ydre Øre-ske installation

Indsæt direkte fra top til bund

Sørg for at montere det, før du bruger den for at forhindre, at øre-skeen falder af



Forholdsregler

1. Hvis øregangen er blevet helt blokeret af ørevoks, bedes du rense øret forsigtigt, og det anbefales at gå til lægen til professionel behandling.
2. Vær opmærksom på omgivelserne før brug, brug det ikke når nogen løber for at undgå skader.
3. Det er forbudt for børn at bruge dette produkt alene for at undgå personskade.
4. Tab ikke maskinen i væske for at undgå skader, da det ikke er vandtæt.
5. Undgå direkte udsættelse af produkter for sollys, især tilbehør, for at undgå de bliver deforme.
6. Under brug stiger produktets temperatur lidt (omkring 32°C) det er meget normalt at det bliver varm.
7. For at sikre den bedste brugeroplevelse skal personen sidde ned når denne bliver brugt.
8. For at holde øregangen ren og sikker, Udskift hovedet på ørekoppen når det er løs eller brugt mere end 30 gange.
9. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at slukke.
10. Produktet må ikke bankes på eller tabes. Hvis det er beskadiget På grund af skader eller tab, skal du stoppe med at bruge det.
11. Beskrivelse af lys: Under opladning tændes det røde lys og lyset slukker, når det er fuldt opladet.
12. Oplad produktet regelmæssigt, hvis det ikke er i brug i lang tid.
13. Du må ikke selv adskille, ændre eller reparere dette produkt.
14. Ved rengøring af linsen, Det anbefales at tørre forsigtigt linse med en vatpind dyppet i vand. Brug ikke ætsende stoffer som alkohol eller lignende (Korrosionslinse), eller brug hård eller skarpe genstande, til at tørre af (Ridser linsen).

Advarsel:

1. Dette produkt skal anvendes under direkte

Tilsyn med en voksen.

2. Dette produkt indeholder små dele, de må ikke puttes i munden, Kvælningsfare. Ikke egnet til børn under 3 år.

3. Minimumsalder er 3 år og derover.

Skadelige materialer


part name	(PB)	(Hg)(Ca)	(Cr (Vi))	(PBB)	(PBDE)
Komponenter på printplade	o	o	o	o	o
plastik skal	o	o	o	o	o
Plast gummi tilbehør	o	o	o	o	o

Denne formular er udarbejdet i overensstemmelse med SJ/T11364

o: Indholdet af dette skadelige stof i alle homogene dele af denne del ligger under grænsekravet iGB/T26572-2011


Q.Kan ikke bruge produktet normalt efter WIFI-forbindelse?

1. Hvis du bruger en VPN-tjeneste, skal du slå VPN-tjenesten fra, og prøv igen
2. Hvis det ikke løser problemet at slukke for VPN, Følg instruktionerne nedenfor for at konfigurere

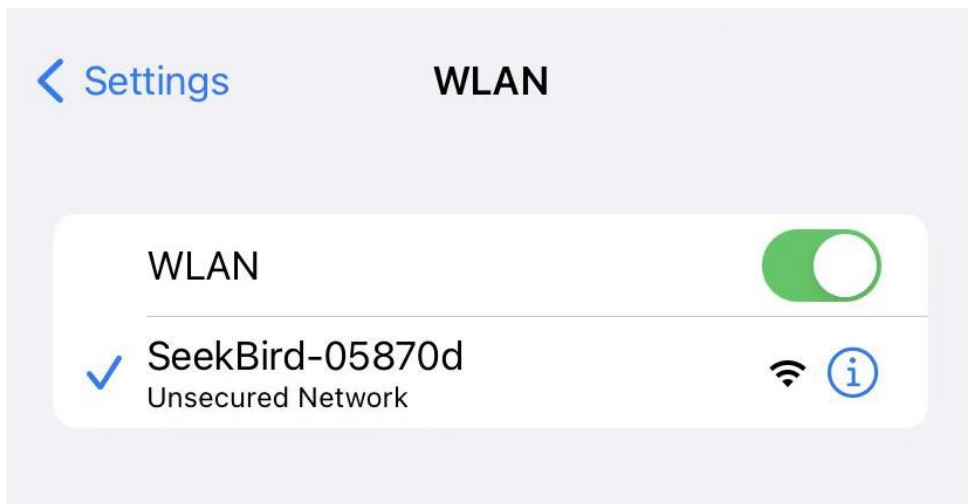

Step 1: Tænd for WIFI, og find den tilsluttede trådløse

Step 2: Klik på 'i'-ikonet på billedet ovenfor

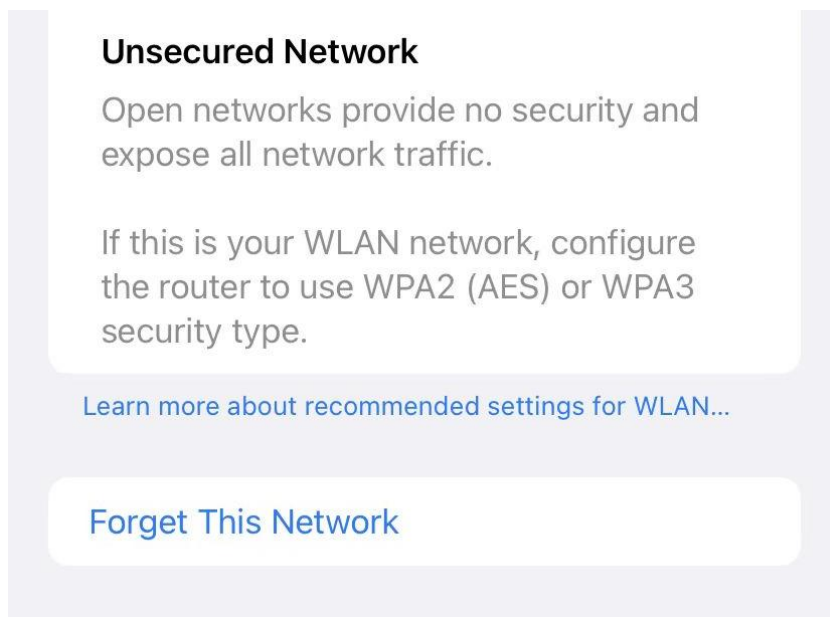

Step 3: Vælg at glemme dette netværk og oprette forbindelse igen

3. Hvis det stadig ikke løses, Afinstaller venligst softwaren og geninstaller den.

Fejlfinding

Fejlfinding 【Hvis mobiltelefon software er er for lav, Følgende fejl kan opstå: (Android system Kræver version 5.0 eller nyere; Apple phone requires IOS 4 eller nyere)】

Fejl	Løsning
Tænd. Intet sker	<ul style="list-style-type: none">• Prøv at tænde den et par gange mere;• Brug din egen opladningsenhed til opladning, Opladningstiden er 1 time.
Kamera Lys virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Genstart enheden;Kontroller, at udstyret er tændt.
Appen afsluttes uventet	<ul style="list-style-type: none">• Genstart din telefon; Eller afinstaller allerede installeret APP, Scan Qr-koden igen for at downloade installationen.• Åbn aptilladelser
Når enheden er tilsluttet appen, vises realtidsbillede ikke	<ul style="list-style-type: none">• Afbryd telefonen fra enhedens WiFi,Nulstil enheden,Tilslut WiFi igen.• Fjern den oprindelige APP, og scan derefter koden igen for at hente og installere appen. Når du bruger APP' en for første gang, skal du sørge for at acceptere tilladelser til appen.
WiFi-forbindelse er ustabil, Fra og til	<ul style="list-style-type: none">• Genstart appen og enheden,Tilslut igen til WiFi.
Hvis ovenstående handling ikke løser problemet, bedes du kontakte vores kundeservice. Så kan vi hjælpe dig videre.	

Garanti og reklamation

Brugeroplysninger	
Navn:	Nummer:
Adresse:	
Salgssted:	Nummer:

Product parameters

Produktnavn	Intelligent visual ear picking spoon
Værtens vægt	19g~34g
WiFi Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenne	Built-in antenna
Working frequency	2.4Ghz
Image transfer rate	30fps
Image Sensor	CMOS
Working temperature	-10 to 50 degrees Celsius
Input Current	DC 5V 500 mA
Lens diameter	3.5-4.5 mm
Best focal length	1.5 ~ 2 cm
Forbind til hotspot	SeekBird-xxx
LED	6*LED

Manualen i produktet er stemplet med et rødt segl for at bevise, at det har bestået kvalitetskontrol, det vil sige overensstemmelseserklæring)

①

Scan QR-koden for
at downloade APP'en

